

BETRIEBSANLEITUNG



XC Rad

Vor der Inbetriebnahme des mySKATE XC Rad bitte unbedingt die **SICHERHEITSHINWEISE** auf Seite 3 & 4 und die Betriebsanleitung aufmerksam lesen und beachten!




Einzelteilbeschreibung mySKATE XC Rad

1. Rahmenklemmen mit montierten Einschubklemmen und Klemmhebeln
2. Begrenzungsringe
3. Rahmenbügel/ Rohrbögen
4. Klemmstück
5. Klappvorbau
6. Heberatsche mit Auslöseknopf und Hebegriff
7. Gabellagergehäuse mit Gabel und Laufrad
8. Gepäckträgeranlageblech (Gepäckträger ist Zubehör)

1. Funktionsbeschreibung der Heberatsche

Einzelteile:

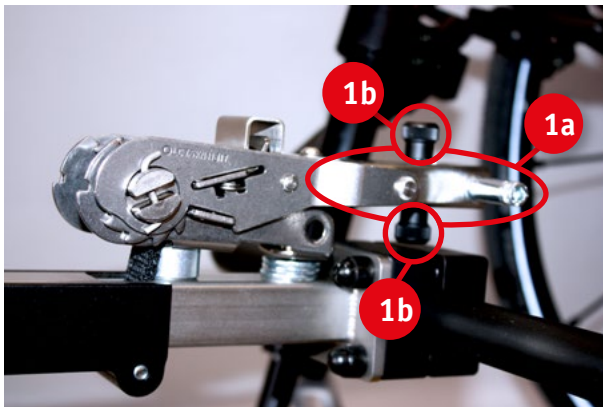

- Ratschenhebegriff (Nr. 1.a)
Dient ausschließlich zum Anheben bzw. Zusammenklappen des mySKATE XC Road Vorbaus. Dabei wird im montierten Zustand der Rollstuhl angehoben und die Lenkräder werden entlastet.
- Auslöseknopf (Nr. 1.b)
Befindet sich an der Vorder- und Rückseite des Ratschenhebegriffes. Der Auslöseknopf muss bis zum Anschlag in Richtung des Ratschenhebegriffes gezogen werden, um diesen nach Vorne zu klappen, wenn der Vorbau aufgeklappt bzw. abgesenkt werden soll. Der Hebegurt wird so freigegeben und der Vorbau klappt auseinander. Die Lenkräder des Rollstuhls setzen auf dem Boden auf, das mySKATE XC Rad wird entlastet und kann entnommen werden.

Sicherheitshinweis:

Bitte achten Sie beim Nutzen der aufgeklappten Mechanik des XC-Rads auf die Einklemmgefahr. Vermeiden Sie unbedingt das hantieren im Mechanikbereich.

2. Einsetzen/ Einbau

- Schließen Sie die Bremsen am Stuhl



- Öffnen Sie die Einschubklemmen am Rollstuhlrahmen
- Klappen Sie den Vorbau des Rades vollständig auf. Ergreifen Sie hierzu den Ratschenhebegriff, schieben den Auslöseknopf vollständig bis zum Ende des Griffs, halten ihn in dieser Position und legen den Hebel ganz nach vorne bis er wieder auf dem Vorbau aufliegt. Nun lässt sich der Vorbau aufklappen.
- Ergreifen Sie die Einschubbügel mit beiden Händen und schieben diese in die Klemmen der Rahmenadaption bis die Begrenzungsringe anstoßen.

Schließen Sie die Klemmhebel. Schieben Sie nun den Auslöseknopf der Heberatsche bis an das Ende des Hebegriffes, halten ihn gedrückt und klappen den Griff zu sich. Lassen Sie dann den Auslöseknopf los.

- Heben Sie sich nun durch Auf- und Abbewegungen des Heberatschengriffs nach oben, bis das System vollständig zusammengefaltet ist und das Ratschenband unter Spannung steht. Der Rollstuhl mit XC-Vorbau ist jetzt fahrbereit.

Ausbau/ Entnahme des mySKATE XC- Rades



1. Fahren Sie soweit zurück das sich das XC-Rad um 180° dreht bzw. die Gabel nach vorne weist.
2. Schließen Sie die Bremsen.
3. Ergreifen Sie den Ratschenhebegriff. Schieben Sie den Auslöseknopf vollständig bis zum Ende des Griffs halten ihn in dieser Position und legen den Hebel nach vorne um bis er wieder auf dem Vorbau aufliegt.



Sicherheitshinweis:

Der Haltegurt wird kurz vor dem Aufliegen freigegeben und der Vorbau klappt plötzlich mit einem lauten Geräusch auf. Dabei setzt sich der Stuhl mit einem Ruck auf die Lenkräder. Nach dem Öffnen der Klemmhebel kann das XC-Rad nach vorne entnommen werden.